

MULTI DROGUES TEST SALIVAIRE

THC15

Généralité



Le test salivaire multi drogues permet de détecter 4 classes de drogues : le cannabis (THC), les amphétamines, la cocaïne et les opiacés (héroïne). Chaque chiffre indiqué dans les fenêtres de lecture est associé à une classe de substance. La correspondance et le seuil de détection sont indiqués ci-dessous :

- C - Contrôle
- T1 - Cannabis : 15 ng/ml
(Δ^9 -Tetrahydrocannabinol)
- T2 - Cocaïnes : 20 ng/mL (cocaïne)
- T3 - Amphétamines : 50 ng/ml.
(D-amphétamine)
- T4 - Opiacés : 40 ng/mL (morphine)

Contenu de la boîte

La boîte contient le matériel nécessaire pour un test : 1 sachet aluminium contenant 1 test de dépistage et son collecteur salivaire.

Précautions d'emploi

Veuillez lire toutes les informations contenues dans cette notice avant d'effectuer le test.

1. Ce test est destiné à un usage externe exclusivement. NE PAS AVALER.
2. Le test n'est interprétable que si le mode d'emploi est scrupuleusement respecté. Bien respecter les temps indiqués.
3. À conserver entre +2 °C et +30 °C. NE PAS CONGELER.
4. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'étiquette et sur le sachet protecteur, ou si celui-ci est endommagé.
5. Ne pas réutiliser ce test.
6. Tenir hors de la portée des enfants.
7. Après usage, jeter tous les composants à la poubelle.

Mode d'emploi

Attendre que le dispositif atteigne la température ambiante entre 15 et 30°C avant de commencer le test.

1. Ne pas manger, fumer ou boire 10 minutes avant de faire le test.

2. Utilisez le dispositif directement après avoir ouvert le sachet. Le test doit être utilisé maximum une heure après l'ouverture du sachet.
3. Enlevez le collecteur de la cassette. Veillez à retirer le capuchon.
4. Frottez le collecteur à l'intérieur des joues et des gencives puis placez le collecteur sur et en dessous de la langue afin de récolter un maximum de salive. Ne mordez pas l'éponge car elle pourrait se briser. Retirez le collecteur lorsque l'indicateur de saturation est devenu rose/rouge (environ 30 secondes).

Note : Si l'indicateur de saturation n'est pas devenu rose/rouge, remplacez le collecteur dans la bouche et continuez à collecter la salive.

5. Insérez le collecteur dans la cassette.

Note : Lors de l'insertion du collecteur dans la cassette, insérez la partie saillante de la tête du collecteur dans l'espace réservé ❶, puis appuyez sur la queue du collecteur pour le fixer ❷.

6. Faites glisser le capuchon bleu dans la direction de la flèche rouge jusqu'au butoir (flèches bleues).
7. Placez le test sur une surface plate lorsque ce dernier migre. Un résultat négatif peut être lu dès l'apparition des bandes dans la zone C (contrôle) et T (test). Les résultats positifs sont à interpréter après 10 minutes. Ne lisez pas les résultats après 20 minutes.

