

TEST SALIVAIRE DE DÉPISTAGE DU THC

Le test de dépistage salivaire NarcoCheck® est un test immuno-chromatographique permettant le dépistage rapide et qualitatif dans la salive humaine de la consommation de cannabis, via la détection de sa substance active, le THC.

TEST	DROGUE DÉPISTÉE	CUT-OFF*	TEMPS DE DÉTECTION
THC	Cannabis, marijuana, haschisch...	10 ng/ml	4 à 6 heures après la dernière consommation

*CUT-OFF : seuil de détection.

DESCRIPTION DU TEST



PRINCIPE DU TEST

Les dispositifs NarcoCheck® sont des tests rapides basés sur une réaction Ac/Ag (anticorps/antigènes). Si la salive du donneur ne contient pas la substance recherchée, la ligne de test devient rouge. Si l'échantillon salivaire contient la substance cible, la ligne de test reste alors totalement blanche.

Ce test monodrogue est composé d'une bandelette de détection. Il délivre un résultat indépendant de type qualitatif, c'est-à-dire « positif » ou « négatif ».

SEUIL DE DÉTECTION

Désigné le plus souvent par sa traduction anglaise « cut-off », le seuil de détection indique la sensibilité des tests rapides de dépistage. Il définit la concentration de substance à laquelle la ligne de test (T) disparaît, c'est-à-dire le moment où le test peut être considéré comme positif.

PRÉCAUTIONS

- Lire attentivement l'intégralité de la notice avant toute utilisation.
- Test à usage unique. Ne pas réutiliser.
- N'ouvrir la pochette contenant le test qu'au moment de l'utiliser.
- Ne pas toucher la languette absorbante, afin d'éviter toute contamination indésirable.
- Ne pas toucher la zone de résultats.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration inscrite sur la pochette.
- Ne pas utiliser si la pochette du test est endommagée (déchirée ou percée).
- Conserver les tests à une température comprise entre +2°C et +30°C.
- Les tests peuvent être réfrigérés à des températures supérieures à +2°C, mais ne doivent pas être congelés.
- Laisser les tests revenir à température ambiante (15-30°C) avant toute utilisation.
- Ne pas ingérer ou inhaler.

PRÉCISIONS

- Ce test dépiste la molécule mère (ou « parente ») du cannabis, à savoir le Δ9-Tetrahydrocannabinol, tel qu'il se dépose en bouche lors de la consommation de cannabis. Ce test est donc totalement optimisé pour détecter les traces de cannabis spécifiques à la cavité buccale et à la matrice salivaire.
- Ce test a été spécifiquement calibré de façon à exclure tout résultat positif dû à une consommation passive (inhalation de la fumée de consommateurs tiers). Un résultat positif à ce test traduit donc une consommation active et effective de cannabis.
- L'ensemble des éléments de ce test et de son emballage doit être éliminé avec les déchets ménagers.
- Dispositif de prévention à usage non-médical.

EXÉCUTION DU TEST


Le donneur ne doit ni boire ni manger durant les 10 minutes précédant le test.

1. Retirer le capuchon de protection de la languette absorbante.
2. Le donneur doit frotter fermement 4 à 6 fois la languette absorbante (le recto et le verso) contre le plat de sa langue.
3. Le donneur doit ensuite placer la languette absorbante entre ses lèvres. Les lèvres du donneur peuvent être posées contre le bord d'appui du test, mais LE PLASTIQUE NE DOIT PAS ENTRER en bouche. Seule la languette absorbante doit entrer en bouche.
NB: le donneur ne doit ni mordre, ni mâcher la languette absorbante, au risque de l'endommager.
4. Le donneur doit alors saliver sur la bandelette absorbante, de façon à la saturer de salive.
5. Après 30 à 60 secondes, la salive commencera alors visiblement à migrer dans la zone de résultats.
Le donneur peut alors retirer la languette absorbante de sa bouche.
NB: le temps de collecte de salive peut être plus long en certaines circonstances, et notamment lorsque la bouche est particulièrement sèche.
6. Replacer le capuchon de protection.
7. Poser le test sur une surface plane.
8. Le test doit alors être lu 10 minutes plus tard.
Le test ne doit pas être lu après 20 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

- Si la ligne de contrôle (C) est visible, le test est valide. Sinon, il est invalide et aucun résultat ne peut en être tiré.
- Si la ligne de test (T) est **VISIBLE**, alors le test est **NÉGATIF** (la substance recherchée n'a pas été détectée)
- Si la ligne de test (T) est **INVISIBLE**, alors le test est **POSITIF** (la substance recherchée a été détectée)

IMPORTANT : l'intensité de la ligne (T) peut être plus ou moins forte. Cela n'a aucune incidence sur le résultat. **Toute ligne visible doit être considérée comme présente.** De ce fait, le test est positif si et seulement si la ligne (T) est **TOTALEMENT invisible.**

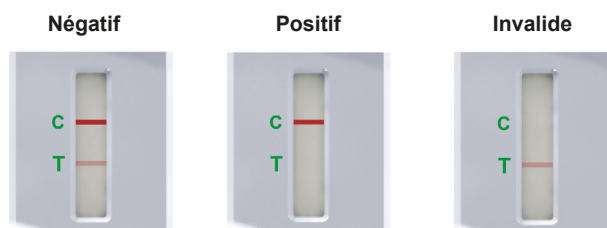

LIMITATIONS

- Les tests rapides de dépistage des drogues sont des dispositifs dits de première intention. Ils ne peuvent donner qu'un résultat analytique préliminaire, qui demande à être confirmé par une méthode d'analyse alternative de référence, comme la chromatographie à phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS), particulièrement lorsqu'ils révèlent un résultat positif.
- Il ne peut être exclu qu'une erreur de procédure ou de manipulation, de même que l'interférence inopinée de certaines substances (notamment médicamenteuses), puissent provoquer un résultat erroné. L'utilisation de tests salivaires doit se faire en toute connaissance du fait qu'aucun test de dépistage ne peut être fiable à 100%.
- Un résultat positif indique uniquement la présence dans la salive d'une drogue/ substance ou de ses métabolites, mais ne peut en aucun cas donner un niveau d'intoxication ou de dépendance.
- Un résultat négatif ne peut attester qu'une drogue/substance n'a pas été consommée, car les traces de celle-ci peuvent être présentes à un niveau de concentration inférieur au seuil de détection du test.

CONDITIONNEMENT ET MARQUAGES

Les tests NarcoCheck® sont conditionnés en pochettes individuelles thermo-scellées, contenant également une plaquette déshydratante. Sur chaque pochette, sont imprimés le nom et la référence du test, son numéro de lot, sa date d'expiration, ainsi que les pictogrammes réglementaires, tels que présentés et expliqués ci-dessous :

	Numéro de Lot		Test à usage unique. Ne pas réutiliser.
	Lire soigneusement le mode d'emploi.		Date de péremption
	Ne pas exposer à la lumière du soleil		
	A conserver entre 2-30°C / 36-86°F		

NarcoCheck®
Kappa City Biotech SAS
32 rue Danton, 03100 Montluçon, France
www.narcocheck.com
NCE-S-THC-1 // v 1.1 - FR // 03/09/2020